

Manual de utilizare

Cadru de mers pliabil Model LD-500

Destinatie	Uz casnic / interior
Variante compatibile	Cadru simplu, Cadru + roti, Cadru + toaleta, Cadru + toaleta + roti
Uz recomandat	Sprijin la mers, recuperare usoara, mobilitate redusa
Importator	Ninodom Online SRL, Braila, Str. Stefan cel Mare nr. 219

Atentie: Cititi integral acest manual inainte de utilizare. Verificati stabilitatea produsului si fixarea tuturor elementelor inainte de prima folosire.

1. Prezentare produs

- Acest produs este un cadru de mers pliabil destinat sprijinirii deplasarii in conditii de siguranta, in special pentru persoane cu echilibru redus sau cu nevoie de sprijin suplimentar la mers.
- Manualul se aplica variantelor fara roti si cu 2 roti, precum si versiunilor prevazute cu functie toaleta.

2. Utilizare recomandata

- Produsul este destinat uzului casnic, in special in interior.
- Poate fi utilizat de persoane cu mobilitate redusa, in perioada de recuperare sau atunci cand este necesar un sprijin suplimentar pentru deplasare.
- Nu este destinat utilizarii pe teren accidentat, pe scari fara insotitor sau pe suprafete alunecoase.

3. Variante uzuale

- Cadru simplu – stabilitate ridicata, fara roti, necesita ridicare usoara la deplasare.
- Cadru + roti – permite impingerea usoara in fata, fara ridicare completa.
- Cadru + toaleta – include sezut si vas, potrivit pentru utilizare asistiva in spatii interioare.
- Cadru + toaleta + roti – combina mobilitatea usoara cu functia toaleta.


4. Pregătire înainte de utilizare

- Purtați încălțăminte comodă, cu talpă antiderapantă.
- Verificați dacă toate componentele sunt bine fixate și dacă produsul este complet deschis și blocat.
- Nu reglați produsul în timp ce mergeți.

5. Reglarea înălțimii

- Poziționați cadrul pe o suprafață plană.
- Reglați ambele laterale la aceeași înălțime.
- Mainile trebuie să se așeze natural pe manere, iar coatele să fie ușor flexate.
- Asigurați-vă că bolturile de reglaj sunt complet fixate în orificiile corespunzătoare.

REGLARE CORECTĂ A ÎNĂLȚIMII

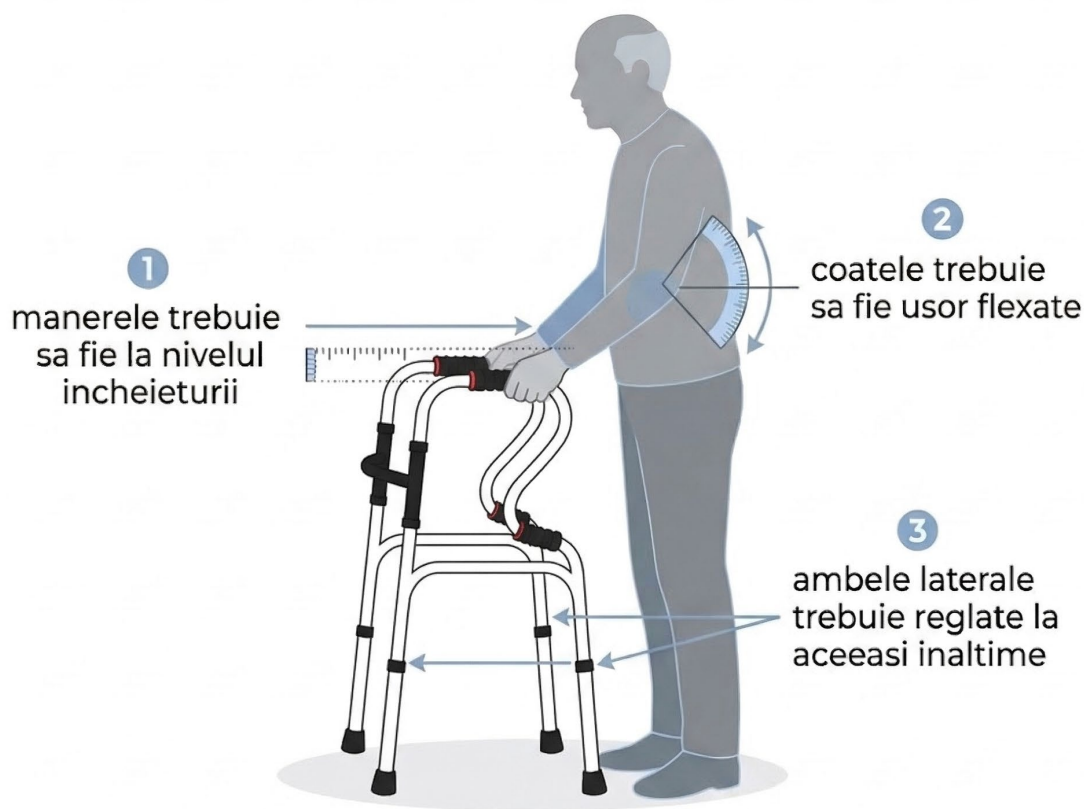

Maini pozitionate
natural



Coate ușor
flexate



Înălțime
reglată egal

6. Verificare de siguranta

- Inainte de fiecare utilizare, verificati cadrul pentru eventuale deformari, jocuri sau fisuri.
- Verificati starea picioarelor de cauciuc si, daca exista, fixarea rotilor.
- Pentru variantele cu functie toaleta, verificati pozitionarea corecta a sezutului si a vasului.

7. Utilizare corecta

- Pentru varianta fara roti: ridicati usor cadrul, mutati-l in fata pe o distanta scurta, apoi pasiti controlat.


Cum se foloseste - varianta fara roti



Pentru mai multa stabilitate pe suprafete plane

- Pentru varianta cu 2 roti: impingeti cadrul usor in fata si pasiti controlat, fara miscari bruste.

Cum se foloseste - varianta cu 2 roti

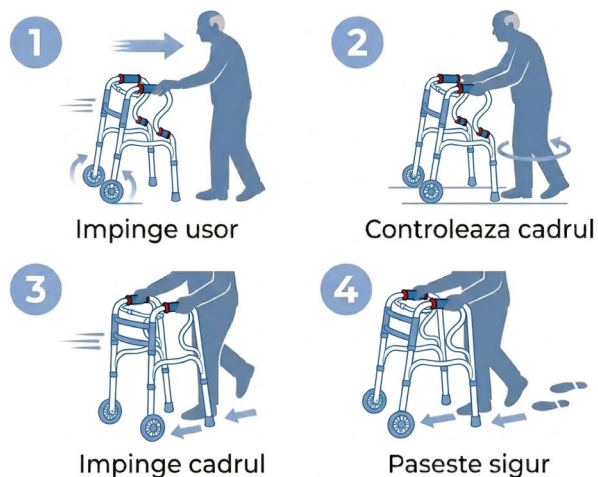

Deplasare mai usoara, fara ridicare completa

- Pentru variantele cu sezut: asezati-va lent si controlat, mentinand produsul stabil.

8. Utilizarea modului pasitor / modului fix

- Mod pasitor: cadrul permite o miscare alternativa mai naturala.
- Mod fix: cadrul devine rigid si se deplaseaza ca o singura structura.
- Comutarea se face numai atunci cand utilizatorul nu se deplaseaza si produsul este stabil.



9. Scari, rampe si suprafete dificile

- Nu utilizati produsul pe scari fara insotitor.
- Nu utilizati produsul pe rampe abrupte sau pe suprafete ude ori alunecoase.
- Pe teren denivelat, reduceti viteza si pasiti cu maxima prudenta.

10. Intretinere si curatare

- Stergeti cadrul cu o laveta uscata sau usor umeda.
- Uscati complet produsul dupa curatare.
- Nu depozitati produsul in medii umede pentru perioade lungi.
- Verificati periodic suruburile, sistemele de reglaj, picioarele si rotile.

11. Probleme frecvente

- Sistemul de reglaj nu se fixeaza bine – verificati alinierea si blocarea completa a bolturilor.
- Picioarele din cauciuc sunt uzate – inlocuiti capetele de cauciuc.
- Rotile se blocheaza – verificati axul si curatati eventualele impuritati.
- Cadrul este fisurat sau deformat – opriti imediat utilizarea.

12. Suport si contact

- Pentru intrebari privind utilizarea sau pentru probleme de calitate, contactati vanzatorul sau importatorul.
- Importator: Ninodom Online SRL
- E-mail: contact@littledomi.ro
- Telefon: 0737202303

Checklist rapid inainte de utilizare

OK

☐☐☐☐☐

Verificare

Toti bolturile si sistemele de reglaj sunt complet fixate

Toate picioarele ating solul uniform

Rotile (daca exista) sunt bine fixate

Sezutul / vasul (daca exista) sunt pozitionate corect

Nu exista fisuri, indoiri sau joc in structura